



**Sie sind der Grund, warum es Ihrem Pferd gut geht.
Mit Ihrer neuen Gravity-B Gewichtsdecke kommen
Sie und Ihr Pferd in Balance – einfach und autark.**

Unser höchster Anspruch an Qualität, Effizienz und eine bedienerfreundliche Anwendung spiegelt sich in diesem Produkt wider. Hier haben wir die wichtigsten Hinweise für Sie zusammengefasst.

Gravity-B Gewichtsdecke – **Art.-Nr. 8001**

Anwendung

Gravity-B ist vielseitig einsetzbar, ob im Training, bei Turnieren oder in der Rehabilitation. Vor intensiven Einheiten hilft sie dem Pferd, sich zu fokussieren, danach beschleunigt sie die Erholung.

Handhabung


Gewöhnen Sie Ihr Pferd langsam an diese Form der Regeneration. Die Decke stimuliert wichtige Druckpunkte durch präzise Gewichtsverteilung. Dieser Tiefendruck regt die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin an – Hormone, die Entspannung und Wohlbefinden fördern. Gleichzeitig wird die Produktion des Stresshormons Cortisol reduziert.

Steigern Sie die Tragezeit der Decke schrittweise:

- Beginnen Sie mit einer Eingewöhnungszeit von 20 Minuten.
- Erhöhen Sie die Tragedauer bei jeder Anwendung um 10 Minuten.
- Die maximale Tragezeit sollte 50 Minuten nicht überschreiten.

Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie Ihr Pferd während der Tragezeit nicht unbeaufsichtigt.
- Verschließen Sie die Decke stets ordnungsgemäß.
- Legen Sie niemals eine weitere Decke darüber.
- Die Decke darf nur im trockenen Zustand verwendet werden.
- Falls sich Ihr Pferd hinlegt, unterbrechen Sie die Einheit sofort.

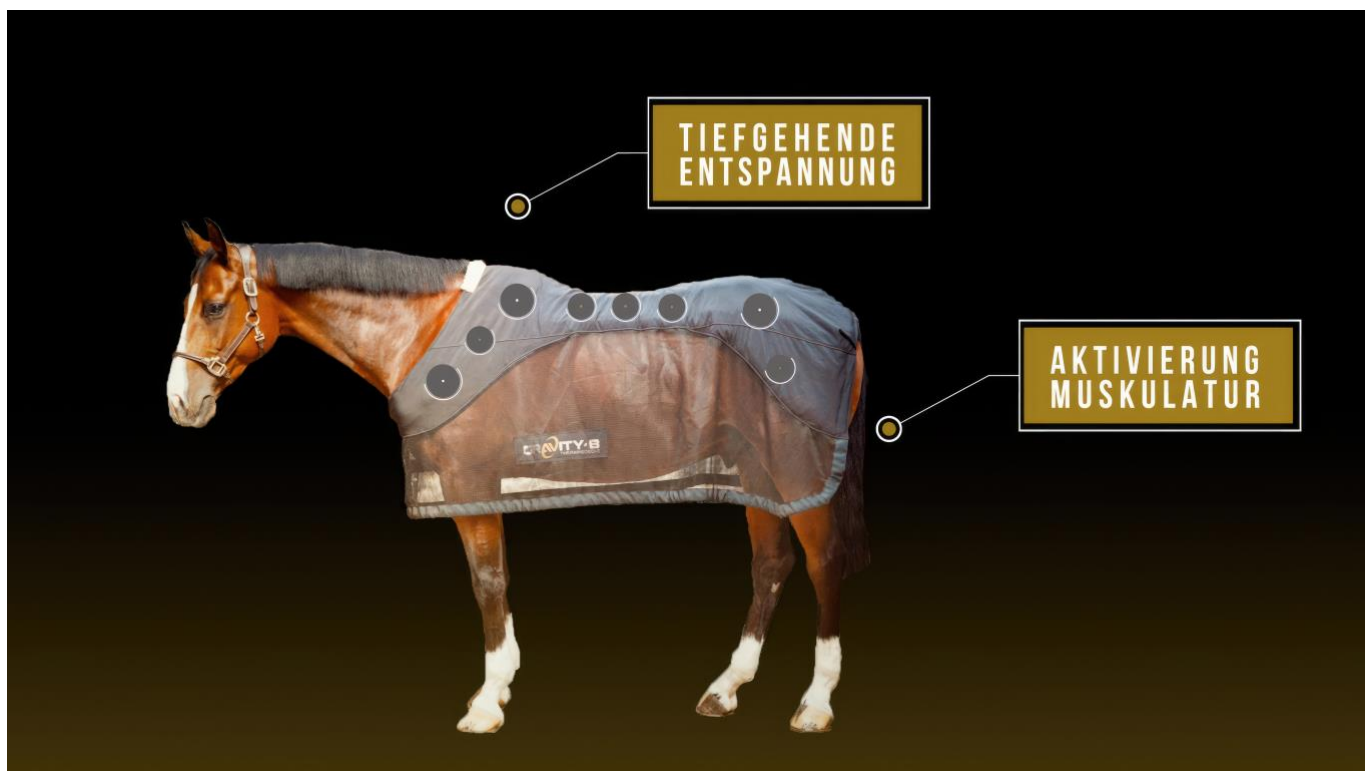

Ob Ihr Pferd die Gravity-B Gewichtsdecke vor oder nach dem Training trägt, liegt ganz bei Ihnen. Die Veränderungen im Körper Ihres Pferdes sorgen für ein federleichtes, regeneriertes Gefühl nach der Einheit – ganz ohne Schonzeit oder besondere Nachsorge.

Legen Sie die Decke behutsam über den ganzen Rücken des Pferdes, indem Sie sie sanft abrollen oder in einem Zug auflegen. Nach der Einheit nehmen Sie die Decke ebenso einfühlsam ab.

Pflegehinweise:

- Nach jeder Anwendung gut auslüften.
- gut getrocknet aufbewahren, um Schimmel zu vermeiden.
- Überschüssige Haare auf der Innenseite regelmäßig entfernen.
- Die Waschanleitung finden Sie im Etikett.

Genießen Sie die Zeit mit Ihrem Pferd – und erleben Sie den Unterschied. Viel Freude mit Ihrer neuen Gravity-B Gewichtsdecke.



0176-23555942
office@gravity-b.de
www.gravity-b.de